




Paraffin Platten

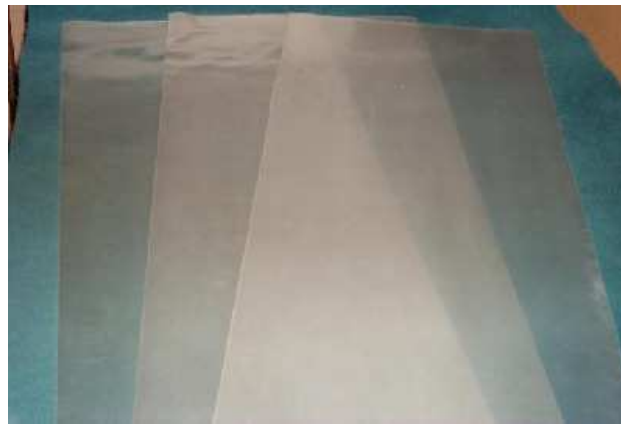




Anwendungs-Technik mit Paraffin-Platten zur perfekten Modell-Technik

Was zur Dimensionserfassung der Leistenplastiken für die Erstellung der Leistenkopien mit Papier oder anderen Materialien geschieht, wird durch die Anwendung mit Paraffin-Platten wesentlich schneller präzisiert.

Aus den transparenten Paraffin-Platten werden für die Leisten-Plastiken entsprechende Grössen-Profile herausgeschnitten.

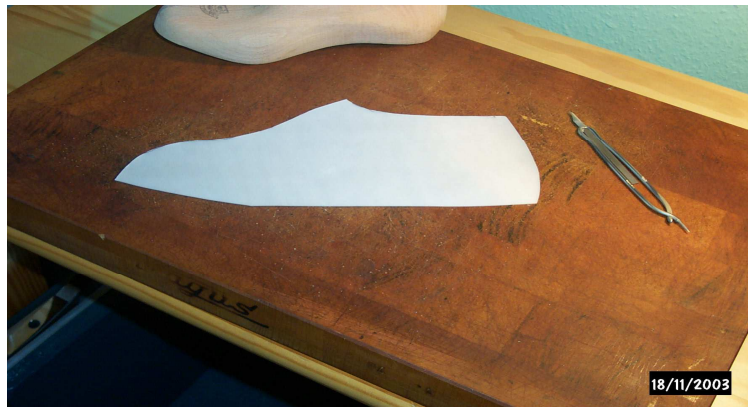

Diese Profile werden bei ca. 30°C von Hand oder mittels Föhn erwärmt. Danach an der Aussenseite der Leistenplastik; über die Längs- und Querachse, Kamm und Sohlenbasis angelegt.






Nach Erstarren des Paraffin-Profiles wird es an der Längs- und Fersenachse, sowie Kamm und Sohlenbasis des Leistens abgeschnitten.




Auf die Paraffin-Oberfläche kann mittels eines wasserfesten Stiftes das Schuh-Design direkt aufgezeichnet werden.

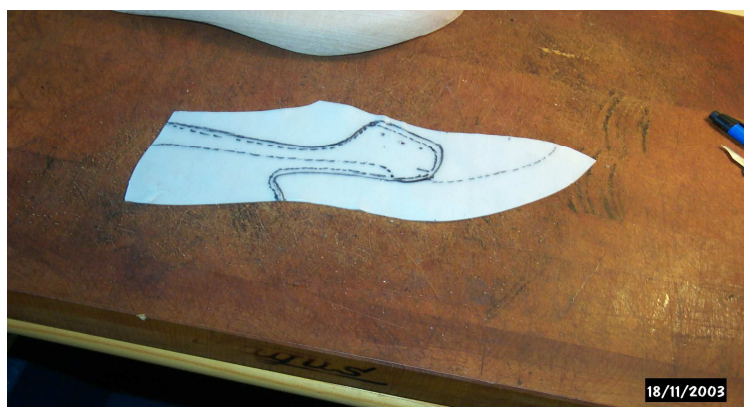



Das erstarrte Profil wird vom Leisten genommen und nach erneutem Erwärmen zur ebenen Fläche gebracht. Insofern stellt sich das Profil in seiner ganzen Dimension dar.

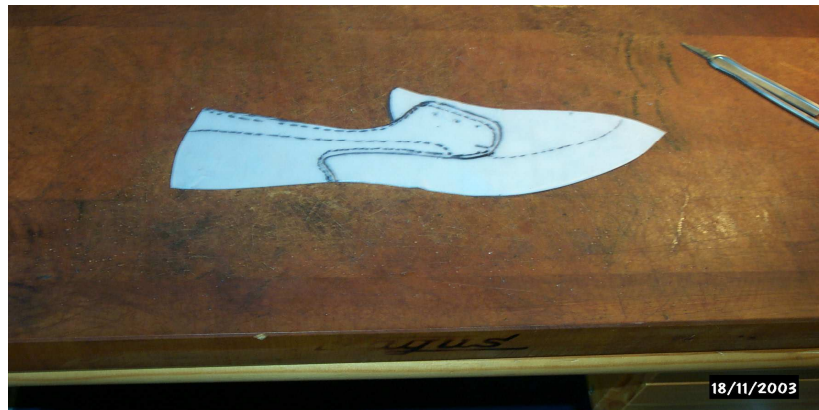

Das Besondere und Wesentliche an dieser Abform-Technik ist, dass die Schäfte nach diesem Modellierverfahren prophylaktisch sich im Spannungsbereich - vor allem - beim Überholen und an den Riegeln bestens bewähren. Das Paraffin entspricht dem Qualitätsmanagementsystem DIN ISO 9001.

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	Preis exkl. MWST
430.025	WF Platten 600 x 380 x 0,8-1,2mm	Platte	CHF 6.65
430.026	WF Peronäus-Form	Stück	CHF 5.50
430.027	WF Herren-Stiefelform	Stück	CHF 2.75
430.028	WF Herren-Halbschuhform	Stück	CHF 2.75
430.029	WF Damen-Stiefelform	Stück	CHF 2.75
430.030	WF Damen-Halbschuhform	Stück	CHF 2.75
430.031	WF Fussabdruckform	Stück	CHF 3.10